

KULLANMA TALİMATI

CICATRİDİNA® VAJİNAL OVÜL

Bileşimi: Hiyalüronik asit sodyum tuzu 5mg, asiatic centella yağı ekstraktı 60mg, calendula yağı ekstraktı 60mg, aloe vera yağı ekstraktı 60mg, esansiyel melaleuca yağı 2 mg, yarı-sentetik gliserid, bht, izopropil paraben, izobütül paraben, bütül paraben.

Endikasyonları: Atrofik ve distrofik vajinal mukozada doku iyileşmesinde tedaviye yardımcı olur. Doğum sonrasında, jinekolojik ameliyatlardan sonrasında, kemoterapi, iyonlaştırıcı radyasyon ve senil kuruluk sonrası distrofiler ile östrojen eksikliğinden kaynaklanan distrofilerde, dokunun iyileşmesine yardımcı olur.

Kontrendikasyonları: Ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet durumlarında kontrendikedir.

Kullanım Şekli: Akşamları 1 ovül veya tıbbi reçeteye uygun olarak kullanılır. Ovüller vajina içerisine derine uygulanır.

Ellerinizi yıkadıktan sonra, blisterin her iki tarafında yer alan önceden kesilmiş çentiklerden çekerek ovülü blisterden çıkarınız.

İlaç Etkileşimleri:

Doktorunuza danışmadan diğer medikal cihazlar ya da ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Uyarılar/Önlemler: Özellikle uzun süreli kullanımda, topikal ürünler aşırı hassasiyet reaksiyonlarına sebep olabilirler. Bu durumda, tedaviye son verilmeli ve uygun tedavi için bir hekime danışılmalıdır. Ürünü çocuklardan uzak tutunuz. Yutmayınız. Gözle temasından kaçınınız.

Saklama Koşulları: Ürünü kutu üzerinde yazılı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Açılmış ya da zarar görmüş ambalajdaki ürünleri kullanmayınız. Çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ürünü ışık ve sıcaktan koruyunuz. 4°C ve 25°C arasındaki sıcaklıkta saklayınız.

Ticari Takdim Şekli: 2 g'lık 10 ovül

TIBBİ CİHAZ

CE 0373

Üretici Firma:

FARMA-DERMA s.r.l.

Via dei Bersaglieri, 10 - 40010 Sala Bolognese (BO) İTALYA

Distribütör:

BİEM TIBBİ CİHAZ ve İLAÇ SAN.TİC. LTD.ŞTİ.

Denizciler Cad. No:7 Ulus / Ankara / TÜRKİYE